

ConvaCare bőrvédő kendő (zöld)

- *segédeszköz felhelyezése előtt* -

A ConvaCare bőrvédő kendő előkészíti a bőrt a segédeszköz felhelyezésére ill. megvédi a felületi gyulladástól, hámsérülésektől.

Filmszerű védőréteget hoz létre a bőr és a segédeszköz

tapadófelülete között, ezáltal biztosítja a megfelelő tapadást.

Használatával megelőzhető a bőr felázása ill. bőrfertőzések kialakulása.



Használata

1. Tisztítsa meg a sztóma környékét, öblítse le és alaposan szárítsa meg.
2. Használja a ConvaCare bőrvédő kendőt a védelmet igénylő bőrfelületen, majd hagyja, hogy a bőre megszáradjon. Ha a bőre kissé gyulladt, a termék használata rövid ideig tartó enyhe égető érzést okozhat.
3. Ezután helyezze fel a bőrvédő alaplappal a bőrre.

ConvaCare eltávolító kendő (barna)

- *segédeszköz eltávolítása után* -

A ConvaCare eltávolító kendő segíti a segédeszköz tapadófelületének leválasztását a bőrről. Kíméletes a bőrhöz, alkoholt és acetont nem tartalmaz. Citrom illata szagtalanító hatású.



Használata

1. Finoman emelje fel a tapadólap, a bőrvédő alaplappal vagy a hidrokolloid kötszer valamelyik sarkát a bőrről.
2. Törölje le a bőrön lévő ragasztóanyagot az eltávolító kendővel, finoman húzza le az alaplappal a bőrről, miközben folytatja a törlést.
3. Enyhe szappannal mossa le a bőrét. Langyos vízzel öblítse le, majd törölje szárazra a bőrét.

A kiadványban szereplő termékek gyógyászati segédeszközök. Nem TB-támogatott termékek. Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, illetve forduljon kezelőorvosához.

Replant 4 Care Kft.

1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.

Telefon: 06 1 374-9080

Fax: 06 1 269-3274

www.replant.hu