

Stomahesive® adhezív paszta 30 gr használati utasítás

A Stomahesive® adhezív paszta nagy hatékonyságú tömítő, szigetelő, és bőrvédő anyag.

Azok a sztómaviselők is használhatják, akiknek a bőre érzékeny, mert nem tartalmaz alkoholt.

A Stomahesive® adhezív paszta kitölti a sztóma körüli egyenetlenségeket, üregeket, valamint segít a szivárgás megakadályozásában. A Stomahesive® adhezív paszta kitűnően alkalmas a bőr védelmére és biztosítja a sztómaterápiás segédeszközök hosszabb viselési idejét.

Javallat:

A legjobb eredmény elérése érdekében ne alkalmazza a pasztát a bőr és a bőrvédő alaplap között. Vékony rétegben használja, olyan gyakran, amennyire szükséges. Ne dörzsölje be a bőrébe. A sztóma körüli használathoz egy felvitelt segítő applikátort talál a dobozban.

A paszta eltávolításához mossa le vízzel a bőrfelületet. Szorosan csavarja rá a kupakot.

10-30 °C között tárolandó.

A ConvaTec folyamatosan nagy figyelmet fordít termékeinek továbbfejlesztésére.

Nagyszerű előnyök – mind egy tubusban!

Könnyű alkalmazni a bőrvédő alaplapnál

- mert könnyebben szabályozható a paszta mennyisége

Könnyű a pasztát kinyomni

- mert a tubus puhább

Könnyű kinyitni

- mert nagy kupakkal rendelkezik

Könnyű tartani

- mert a tubus anyaga kellemes tapintású

Könnyű tárolni

- mert a kupakjára állítható

Könnyű kezelni

- mert a puha műanyag tubus nem töredezik meg, a paszta nem szárad ki

További információért, kérjük, hívja vevőszolgálatunkat az ingyenesen hívható zöld számon: 06 80 201-201

Forgalmazza:

Replant 4 Care Kft.

Tel: 374-90-80

1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.

Fax: 269-3278