



Használati útmutató



1. Győződjön meg róla, hogy a párna ki van hajtva a párna szélesebb részével felfelé nézzen (ahogy azt a nyilak a leválasztó papíron mutatják). Távolítsa el a leválasztó papírt.
2. Rögzítse a párnát a fehérneműbe, ügyelve arra, hogy megtartsa a "csésze" formáját.
3. Rögzítse a párnát a ragasztószalaggal a belső oldalra a saját, szorosan illeszkedő alsóneműjébe, ügyelve arra, hogy a ragasztó felület ne érintkezzen a bőrrel.

Tanácsok és tippek:

Termék kiválasztása

- Válassza ki a beteg igényeinek megfelelő nedvszívó képességű terméket.
- Az megfelelő teljesítmény elérésének érdekében javasoljuk a betét használatát egy szorosan illeszkedő alsóneművel.
- Nem javasoljuk boxeralsó használatát.

Hulladékkezelés

- Tekerje fel a betétet, és klinikai hulladékkezelési szabályzatának megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ne húzza le a betétet a WC-n.

További információkért keresse a www.replant4care.hu weboldalt.