

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



0086
MISC 2025

STERIL

**AQUACEL™ Ag + EXTRA™
továbbfejlesztett Hydrofiber™ kötszer ezüstionnal és megerősített rostokkal**

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Ne használja, ha a csomagolás sérült!

MISC 2215



Egyszer használatos

MISC 2026



Gamma sterilizált

MISC 2017




Rendelési szám

MISC 2125



Száraz helyen tartandó

MISC 2184

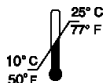

Szobahőmérsékleten tartandó

MISC 2047a



Olvassa el a használati utasítást

MISC 2217



Gyártási szám

MISC 2063



Lejárat dátum

MISC 2060

TERMÉKLEÍRÁS

Az AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ továbbfejlesztett Hydrofiber™ kötszer ezüstionnal és megerősített rostokkal egy puha, steril, nem szövött kötszer, mely kétrétegű 1,2% ezüstionnal (antimikrobiális hatóanyag) impregnált nátriumkarboximetil-cellulóz réteg, melyet etilén-diamin-tetraecetsavval (EDTA) és benzetónium-kloriddal (BeCl) fejlesztették tovább, valamint megújult cellulóz rostokkal erősítették meg.

Az AQUACEL™ Ag+ EXTRA™ kötszer felszívja a sebváladék és a baktériumok nagy részét, és puha, egybefüggő gélt hoz létre, amely kíméletesen illeszkedik a sebfelszínhez, nedves sebkörnyezetet hoz létre és segíti a nem életképes szövetek eltávolítását a sebből (autolitikus debridáció).

A nedves sebkörnyezet és a sebben lévő baktériumok ellenőrzése támogatja a test gyógyulási folyamatát és segíti a sebfertőzés kockázatának csökkentését. A kötszerben található ezüstion elpusztítja a patogén mikroorganizmusokat: mind a planktonikusan előforduló, mind a bakteriális biofilmen belül található baktériumokat, élesztőgombákat és penészt.

A kötszer felbontja és felszívja a biofilmet, meggátolja a biofilm kialakulását és ismételt kialakulását és megnöveli az ezüstion átvitelének hatékonyságát a mikroorganizmusok felé.

A kötszer antimikrobiális gátat is képez, mely a sebágy védelmét szolgálja. ¹

JAVALLATOK

AQUACEL Ag+ EXTRA továbbfejlesztett Hydrofiber kötszer ezüstionnal és megerősített rostokkal a HASZNÁLATI UTASÍTÁSNAK megfelelően használható a következő sebek kezelésére:

- a kötszer fizikai akadályt képez a baktériumok behatolása ellen, ezáltal segít csökkenteni a fertőzést;
- fertőzött sebeknél vagy olyan sebek esetén, amelyeknél nagy a fertőzés kockázata;
- diabéteszes láb, lábszárfekély (vénás, artériás eredetű, kevert etiológiájú), és nyomási fekély (részleges vagy teljes) esetén;
- sebészeti beavatkozásoknál keletkező sebeknél;
- traumás sebeknél;
- vérzésre hajlamos sebeknél, például olyan sebeknél, amelyek mechanikusan vagy sebészeti úton keletkeztek;
- váladékozó daganatos sebeknél, mint a mikózis fungoides, után manifesztáció, fungoid karcinóma, bőráttéti daganat, Kaposi-szarkóma és angioszarkóma;
- ahol valószínűsíthetően baktériumok okozzák a seb krónikus/nem gyógyuló voltát.

ELLENJAVALLATOK

Az AQUACEL Ag+ EXTRA továbbfejlesztett Hydrofiber kötszer ezüstionnal és megerősített rostokkal használata nem ajánlott azoknál az egyéneknél, akik érzékenyek vagy allergiás reakciót mutatnak az ezüstre, a nátrium-karboximetil-cellulózra, az etilén-diamin-tetraecetsavra (EDTA) vagy a benzetónium-kloridra (BeCl).

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS MEGJEGYZÉSEK

- **Figyelem!** A sterilitás garantált, kivéve ha a csomagolás sérült vagy használat előtt nyitva volt. Ha a termék csomagolása sérült, ne használja az abban lévő kötszert.
- A kötszer egyszer használatos, nem használható fel újra. Az újrafelhasználás a fertőzés kockázatának növekedéséhez vagy keresztfertőződéshez vezethet, lehetséges, hogy a kötszer fizikai tulajdonságai az optimális céltól eltérően megváltoznak.
- Előfordulhat, hogy a sterilizálási folyamat következményeként enyhe szag érezhető a kötszer közvetlen csomagolásának kinyitásakor.
- Üreges, mély, járatokkal teli sebek esetén használja az AQUACEL™ Ag+ továbbfejlesztett Hydrofiber™ szalagkötszert ezüstionnal és megerősített rostokkal.
- A test normális öngyógyító folyamata során nem életképes szövetek távoznak el a sebből (autolitikus debridáció), amely következtében a seb kezdetben nagyobbak tűnhet.
- A kötszer bármilyen irányban vágható.
- Ha nehézséget okoz a kötszer eltávolítása, itassa át a kötszert vízzel vagy steril sóoldattal egészen addig, amíg az könnyen eltávolítható lesz.
- Mivel a kötszer nedves sebkörnyezetet biztosít, ezzel hozzájárul új erek képződéséhez, az újonnan képződött gyenge erek azonban ritkán vérfoltos sebváladékot okozhatnak.
- A kötszer nem kompatibilis az olaj-alapú termékekkel, mint pl. a petroleum származék.
- Másodlagos kötszer választásához olvassa el a HASZNÁLATI UTASÍTÁS erre vonatkozó részét.

- Indokolt esetben beavatkozás szükséges (pl. fokozatos kompresszió alkalmazása vénás lábszárfekély kezelésénél vagy nyomáscsökkentő eszközök alkalmazása nyomási fekélyek esetén, szisztémás antibiotikumok szedése és gyakori megfigyelés sebfertőzés kezelésekor, vércukorszint ellenőrzése diabéteszes sebek esetén, stb.).
- A kötszert ne használja sebészeti szivacsként.
- Felhívjuk az orvosok / egészségügyi szakemberek figyelmét, hogy kevés adat áll rendelkezésre ezüstionot tartalmazó termékek hosszantartó és ismételt használatáról, főként gyermekeken és újszülötteken történő alkalmazásáról.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- A kötszer használata előtt tisztítsa meg a sebet megfelelő sebtisztítóval.
- AQUACEL™ Ag+ EXTRA Hydrofiber kötszer ezüstionnal és megerősített rostokkal legalább 1 cm-rel érjen túl a sebfelületen.
- A kötszer mély sebeknél történő használatakor a kötszer a seb 80%-át töltse ki, mivel a kötszer a sebváladékkal érintkezve megduzzad, így kitölti a seb területét.
- A kötszert a következő kötszerekkel együtt javasolt használni:
 - nedvességet megőrző fedőkötszerrel, mint például AQUACEL® Foam, Foam Lite ConvaTec, Granuflex™ Extra Thin vagy CarboFlex™ gyengén vagy közepesen váladékozó sebek esetén;
 - nem öntapadó fedőkötszerrel, mint például a nem tapadó Aquacel Foam™, CarboFlex™ vagy gézlap erősen váladékozó sebek esetén;
 - száraz sebek esetén nézze meg a HASZNÁLATI ÚTMUTATÁS SZÁRAZ SEBEKRE vonatkozó részét.
- Az egyes fedőkötszerek helyes használatáról olvassa el a használati utasítást!
- Minden seb rendszeres ellenőrzést igényel. Távolítsa el a kötszert, ha klinikailag indokolt (átázás, túlzott vérzés, megnövekedett fájdalom) vagy maximum 7 nap elteltével!

SZÁRAZ SEBEK ESETÉN

- Helyezze a kötszert a sebre és nedvesítse be steril sóoldattal a kötszert a seb felszíne fölötti területen. Az AQUACEL Ag+ EXTRA továbbfejlesztett Hydrofiber kötszer ezüstionnal és megerősített rostokkal vertikális nedvességfelszívó tulajdonsága elősegíti a nedves sebkörnyezet fenntartását és csökkenti a maceráció kockázatát. Fedje le a kötszert nedves sebkörnyezetet fenntartó kötszerrel, mint például a Granuflex™ Extra Thin, annak érdekében, hogy elkerülje a kötszer kiszáradását és ezáltal a kötszer sebre tapadását.

Szobahőmérsékleten tartandó (10°C - 25°C/50°F - 77°F). Száraz helyen tartandó.

További információért keressen fel bennünket az alábbi címen:

Replant 4 Care Kft.

1119 Budapest, Nándorfejevári út 35.

replant.hu

© 2013 ConvaTec Inc.

®/™ a ConvaTec Inc. bejegyzett védjegye

¹ Az antimikrobiális aktivitás in vitro mikrobiológiai vizsgálat által kimutatva.