

Az AQUACEL® Foam kötszer öntapadó és nem öntapadó változatban is beszerezhető. Használja az AQUACEL™ Ag+ Extrá-t elsődleges kötszerként a mély, váladékozó sebekre, melyek fertőzöttek vagy fertőzésveszélynek vannak kitéve és AQUACEL® Foam kötszerrel fedje le.

Javallat

Orvosi felügyelet alatt az AQUACEL® Foam habkötszerek mind krónikus, mind akut sebek kezelésére alkalmazhatóak, úgymint:

- Lábszárfekélyek, nyomási fekélyek (II-IV. stádium) és diabéteszes fekélyek.
- Műtési sebek (pl. műtét utáni sebek, másodlagos sebgyógyulást mutató sebek, donor területek).
- Részleges égések (másodfokú égési sérülések).
- Traumatikus sebek (pl. horzsolások és szakadások).
- Váladék felszívására onkológiai sebek esetén (pl. gombás bőr tumorok, bőrrák áttétek, Kaposi-szarkóma).

Az AQUACEL® Foam habkötszer kisebb horzsolásokra, vágásokra, felszadt sebekre, kisebb forrázott és égési sebekre is alkalmazható.

Hatásmechanizmus

A sebpárna belsejében található hab és Hydrofiber® anyagok felszívják a sebváladékot és a baktériumok nagy mennyiségét. A sebbel érintkező Hydrofiber® réteg egy puha, egybefüggő géllé alakul, amely illeszkedik a seb felszínéhez és nedves sebkörnyezetet tart fenn (amely segíti a szervezet gyógyulási folyamatát), valamint elősegíti az elhalt szövetek eltávolítását a sebből (autolitikus debridáció), a szövetek károsodása nélkül.

Alkalmazás

A kötszer felhelyezése előtt a sebet egy megfelelő sebtisztítóval meg kell tisztítani (pl. Stericlens®-szel), és a környező bőrterületet meg kell szárítani. Válasszon akkora kötszert, melynek a felszívó sebpárna része a sebszéleken legalább 1 cm-rel túlér. Vegye ki a kötszert a steril csomagolásból úgy, hogy az ujjak a lehető legkisebb felületen érintkezzenek a kötszer sebbel érintkező, öntapadó felületével. Illessze a kötszer középső részét a seb középső területe fölé. Öntapadó kötszer használata esetén egy megfelelő kötésrögzítő pólya vagy ragtapasz használata szükséges a kötszer rögzítéséhez. Sebváladéktól függően maximálisan 7 napig javallott a seben fennhagyni. A kötszer eltávolításához a kötszert finoman nyomjuk rá a bőrre és óvatosan emeljük fel a kötszer egyik sarkát. Folytassuk mindaddig, amíg az összes szegély szabaddá nem válik.

AQUACEL® Foam

Külső filmréteg:

- vízálló vírus- és baktériumgátat képez,
- csökkenti a fertőzés kockázatát,
- elősegíti a felszívott váladék eltávolítását.

Vékony szilikonperem:

- biztonságosan tapad a bőrre,
- bőrbarát összetevői a kötszer egyszerű felhelyezését és eltávolítását teszik lehetővé.

Hydrofiber® habkötszer

Az AQUACEL® Foam öntapadó és nem öntapadó habkötszer a steril Hydrofiber® habkötszerek egy típusa, mely külső poliuretán vízálló filmrétegből és egy többrétegű abszorbens párnából áll. Az öntapadó kötszernek szilikon tartalmú szegélye van. A többrétegű felszívó sebpárna egy poliuretán habréteget és egy nem szőtt, Hydrofiber® technológiájú (nátrium-karboximetil-cellulóz) sebbel érintkező réteget tartalmaz.

AQUACEL® Foam

Az AQUACEL® Foam habkötszer egyesíti a habok és a Hydrofiber® tartalmú kötszerek előnyeit. A kötszer a folyadékfelszívás- és megtartás egy kivételes kombinációjával rendelkezik. A puha habréteg fokozza a beteg kényelemérzetét.



Méret	Sziget mérete	Kötszer/ doboz	Termékkód
5 x 5 cm nem öntapadó	-	10	420631CW
10 x 10 cm nem öntapadó	-	10	420633CW
15 x 15 cm nem öntapadó	-	5	420635CW
15 x 20 cm nem öntapadó	-	5	420637CW
20 x 20 cm nem öntapadó	-	5	420636CW
10 x 10 cm öntapadó	7 cm x 7 cm	10	420680CW
12,5 x 12,5 cm öntapadó	8,5 x 8,5 cm	10	420619CW
17,5 x 17,5 cm öntapadó	13,5 x 13,5 cm	10	420621CW