

Hydrofiber® sebészeti fedőkötyszer

Javallat

- Elsődlegesen gyógyuló sebekre (pl.: traumatikus sebekre és különféle post-operatív sebekre/bemetszésekre).

Hatásmechanizmus

A magas nedvszívóképességű, közepesen elhelyezkedő Hydrofiber® technológiájú sebpárna felszívja és megtartja a sebváladékot, puha összeálló géllé alakul, mely nedves sebkörnyezetet tart fenn és támogatja a test gyógyulási folyamatát. Az Aquacel™ SURGICAL fedőkötyszer vízálló, bakteriális- és vírusgátat képez.

Alkalmazás

Akkora méretű kötsert válasszon, hogy a középső Hydrofiber® sebpárna lefedje a sebfelületet. Az öntapadó felületet finoman nyomja rá a seb környéki bőre a biztos tapadás érdekében. A kötser eltávolítása során az egyik kezével nyomja azt a beteg bőrére, és finoman emelje el a másik kezével a kötser sarkát. Nyújtsa meg a kötsert a tapadás megszüntetéséhez. Nem szükséges eltávolítanunk a kötsert ahhoz, hogy megbizonyosodjunk a kötéscsere szükségességéről, köszönhetően az áttetsző hátlapnak. Akkor távolítsa el az Aquacel™ SURGICAL fedőkötsert, amikor klinikailag indokolt (pl. szivárgás, bő vérzés, stb. vagy hét nap elteltével).

AQUACEL™ SURGICAL

Az AQUACEL™ SURGICAL az egyéb nem-szövött post-operatív műtéti fedőkötserre képest:

- csökkenti a bőr hólyagosodását,
- csökkenti a gyakori kötéscsere szükségességét.

Felveszi a seb alakját, ezáltal:

- tökéletesen illeszkedik a sebfelszínhez, minimalizálja a sebágyban a szabadon hagyott területeket, ahol a baktériumoknak lehetőségük van a szaporodásra,
- maximálisan illeszkedik a bemetszésekhez, akár az ízület hajlítása közben, illetve postoperatív ödéma fennállása esetén is.

Felveszi a seb alakját, ezáltal:

- tökéletesen illeszkedik a sebfelszínhez, így minimalizálja a sebágyban a szabadon hagyott területeket, ahol a baktériumoknak lehetőségük van a szaporodásra,
- maximálisan illeszkedik a bemetszésekhez, akár az ízület hajlítása közben, illetve postoperatív ödéma fennállása esetén is.

Hydrofiber® kötser

A Hydrofiber® kötser magába zárja a sebváladékot, korlátozza a folyadék oldalirányú terjedését, csökkenti a maceráció kialakulásának valószínűségét.

A kötser rostjainak belsejébe köti meg a sebváladékot, ezáltal hatékony váladékkezelést biztosít megakadályozva a baktériumok elszaporodását. Endogén baktericid hatása van.

AQUACEL® SURGICAL

A kötser eredeti méretéhez képest 20%-kal megnyújtható, ugyanakkor visszanyeri eredeti méretét, minde mellett megőrzi integritását, mely tulajdonsága azért fontos, mert a könyök, illetve térdízületi sebek esetében a végtag behajlítása során a kötser a bőrrel együtt nyúlik meg, majd húzódik össze. A rehabilitáció (gyógytorna) nem eredményez bőrirritációt, köszönhetően a kötser magas fokú flexibilitásának.



A bőrbarát összetevőkből álló hidrokolloid anyag biztonságosan tapad és eltávolítása atraumatikus, a seb környéki bőrfelületet nem károsítja. A vízálló poliuretán filmréteg amellest, hogy vírus- és baktérium gátat képez (abban az esetben, ha a kötser ép és nincs szivárgás) lehetővé teszi, hogy a beteg zuhanyozni tudjon a kórházi tartózkodás ideje alatt.

Méret	Az alábbi méretű bemetszésekre	Kötser / doboz	Termékkód
9 x 10 cm	4 cm	10	412017CW
9 x 15 cm	9 cm	10	412018CW
9 x 25 cm	17 cm	10	412019CW
9 x 35 cm	27 cm	10	412020CW