



FoamLite™

ConvaTec

Öntapadó szilikonos habkötszer

hu MAGYAR



MISC 2026
Egyszer
használatos



MISC 2061A
Etilén-oxiddal
sterilizálva



MISC 2215
Ne használja, ha a
csomagolás sérült!



MISC 2125
Rendelési szám



MISC 2184
Szárazon tartandó



Szobahőmérsék-
leten tartandó



MISC 2045
Használatról kérje ki
tanácsát kezelőorvosától!



MISC 2063
Lot number
Gyártási szám



MISC 2060
Lejárat dátum



MISC 2231
Nem tartalmaz ter-
mészetes latex gumit.



MISC 2199
Fénytől védendő

Termékleírás

A Foam Lite™ ConvaTec kötszer egy vékony, alakítható, rétegelt poliuretán habkötszer. A kötszer vízálló külső poliuretán filmrétegből, nedvszívó habrétegből és átluggatott, lágy szilikon tapadó rétegből áll.

A külső vízálló filmréteg véd a vírusokkal és baktériumokkal szemben, valamint megvédi a sebet a külső szennyeződésektől, ezáltal csökkenti a fertőzés kockázatát. A kötszer felső filmrétege a seb védő funkcióját látja el, a baktériumokkal és a vérben képződő, vírusos kórokozókkal szemben (mint pl. a HIV és a hepatitisz vírusa). A kötszer használata mellett nincs garancia az AIDS vagy a hepatitisz vírus átadása ellen.

A sebbel érintkező felület átluggatott, lágy szilikonos tapadó réteggel van bevonva, mely biztonságos, bőrbarát tapadást tesz lehetővé.

A Foam Lite™ ConvaTec kötszer az alacsony váladékszintű sebekre lett tervezve és segít a nedves sebkörnyezet fenntartásában, mely elősegítheti a gyorsabb sebzárást. A Foam Lite™ ConvaTec kötszer mellett másodlagos rögzítő használata nem szükséges. A Foam Lite™ ConvaTec kötszert felhelyezés során többször újra lehet pozícionálni.

Javallatok

A Foam Lite™ ConvaTec kötszereinek használata alacsony váladékszintű vagy nem váladékozó sebek széles körének kezelésére javallott. Orvosi felügyelet mellett a Foam Lite™ ConvaTec kötszer krónikus és akut sebek kezelésére is használható, mint pl. de nem kizárólag a:

- Lábszárfekélyek, nyomási fekélyek és diabéteszes sebek.
- Műtéti úton keletkezett sebek (pl. másodlagosan gyógyuló posztoperatív sebek és donor területek).
- Részleges (másodfokú) égési sérülések.
- Traumás sebek (pl. horzsolások, felszakadt sebek, hólyagok, kisebb vágások és felszakadt bőrfelületek).

Ellenjavallatok

A Foam Lite™ ConvaTec kötszer használata nem ajánlott azoknál az egyéneknél, akik érzékenyek vagy allergies reakciót mutatnak a kötszerre vagy annak összetevőire.

A Foam Lite™ ConvaTec kötszeri nem kompatibilisek az olajalapú termékekkel vagy olyan bőrpuhítókkal, mint pl. petróleum származékok.

Ne használja a Foam Lite™ ConvaTec kötszerit oxidáló anyagokkal, mint pl. a hidrogén-peroxin vagy a hipokloritos oldatok.

Óvintézkedések és megjegyzések

Figyelem: A sterilitás garantált, amíg a csomagolása meg nem sérül vagy ki nem nyitják. Egyszerhasználatos, ne használja újra. Az újbóli felhasználás a fertőzés vagy a keresztfertőződés megnövekedett kockázatát eredményezheti. Előfordulhat, hogy a kötszer fizikai tulajdonságai az optimális céltól eltérően megváltoznak. A kötszert ne használják más sebkezelő termékekkel együtt anélkül, hogy előzetesen orvossal konzultálnának. A test normális öngyógyító folyamata során nem életképes szövetek távoznak el a sebből (autolitikus debridáció), amely következtében a seb az első néhány kötőscsere alkalmával nagyobbak tűnhet. Ha a következők figyelhetők meg: irritáció (kivörösödés, gyulladás), maceráció (bőr kifehéredése), hipergranuláció (túlzott szövetképződés), vegye fel a kapcsolatot egészségügyi szakemberrel. A sebet kötőscsere alkalmával meg kell vizsgálni, hogy fellépett-e (1) fertőzésre utaló jel (megnövekedett fájdalom, kivörösödés, seb körüli szöveteken melegérzete/vörössége, sebváladékozás), (2) ha megváltozik a

seb színe és/vagy szaga, (3) ha bármilyen egyéb váratlan tünet jelentkezik (pl. maceráció vagy hipergranuláció).

A Foam Lite™ ConvaTec kötszerek használatát nem tanulmányozták herpesz vagy ótvar okozta sebek esetén. Továbbá, lábszárfekélyre, nyomási fekélyre, diabéteszes fekélyre, részleges (másodlagos) égési sérülésekre, donor területekre, műtéti vagy traumatológiai sebekre, melyek elsődlegesen vagy másodlagosan gyógyulnak:

- A fent felsorolt sebtípusok kezelését csak egészségügyi szakember felügyelete mellett szabad végezni.
- Megfelelő kiegészítő kezelési módokat kell alkalmazni, ahol javallott (pl. fokozatos nyomást biztosító kompressziós pólyák használata vénás lábszárfekély esetén vagy nyomáscsökkentő eszközök használata nyomási fekélyek esetén).
- A krónikus sebek kolonizációja gyakori és nem ellenjavallott ilyen esetben sem a kötszer használata. A kötszer fertőzött sebekben is használható egészségügyi szakember felügyelete mellett, megfelelő terápiával és a seb gyakori megfigyelése mellett.
- A vércukorszint ellenőrzése és egyéb, megfelelő támogató lépések alkalmazandóak diabéteszes lábsebek esetén.
- A másodfokú égési sebek esetén vegye fontolóra egyéb műtéti eljárások alkalmazását is, ha a seb 14 nap után sem epitelizálódik. A Foam Lite™ ConvaTec kötszeri a megfelelő alakra és méretre vághatóak, egészségügyi szakember irányítása mellett. A vágott kötszert lehetséges, hogy plusz rögzítővel kell ellátni a biztonságos rögzítés érdekében. Vágott kötszer esetén előfordulhat, hogy a vírusok / baktériumok elleni védelem sérül.

Használati utasítás

1. Ha a közvetlen steril csomagolás megsérült, ne használja.

2. A seb területének előkészítése és tisztítása

A kötszer felhelyezése előtt tisztítsa meg a seb területét megfelelő sebtisztítóval és szárítsa fel a seb körüli bőrt. Győződjön meg róla, hogy a seb körüli bőr mentes mindenféle bőrpuhítótól vagy olaj alapú terméktől, melyek kihathatnak a kötszer tapadására.

3. A kötszer előkészítése és felhelyezése

a) Válassza ki a megfelelő méretű kötszert – válasszon olyan méretű és alakú kötszert, ahol a középső sebpárna rész legalább 1 cm-rel (1/3 inch) nagyobb, mint a seb területe.

b) Vegye ki a kötszert a steril csomagolásból, igyekezzen kerülni a kötszer sebbel érintkező felületének kézzel való érintését, majd távolítsa el a hátoldali védőborítást.

c) Tartsa a kötszert a seb fölött, helyezze a kötszer középső részét a seb közepe fölé. Simítsa rá a kötszert a sebre és győződjön meg róla,

hogy a kötszer a seb teljes felületén jól tapad.

d) A Foam Lite™ ConvaTec kötszeri vághatóak, különösen sarok, könyök és egyéb, nehezen kötözhető helyeken lévő sebek kötözése esetén. Kiegészítő ragtapasz vagy egyéb rögzítő eszköz alkalmazása szükséges a kötszer fenntartásához.

e) Dobja el a kötszer fel nem használt részét kötözés során.

4. A kötszer eltávolítása

a) A kötszert le kell cserélni, ha klinikailag indokolt (pl. szivárgás, vérzés, megnövekedett fájdalomérzet, fertőzés gyanúja lép fel). A maximálisan javallott viselési idő 7 nap.

b) A kötszer eltávolításához finoman nyomja rá a kötszert a bőrre és óvatosan emelje el a kötszer egyik sarkát. Addig folytassa, amíg a sebszélek láthatóvá nem válnak. Óvatosan emelje le a kötszert és dobja ki a helyi klinikai protokolloknak megfelelően.

Szobahőmérsékleten tárolandó (10°C - 25°C/ 50°F - 77°F).

Fénytől elzárva tárolandó.

Tartsa száraz helyen.

Ha további információ vagy utasítás szükséges, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a ConvaTec céggel.

Az Egyesült Királyságban készült.

© 2016 ConvaTec Inc.

® / ™ a ConvaTec védjegyei

Forgalmazza:

Replant 4 Care Kft.

1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.

Telefon: 06 1 374-9080

Fax: 06 1 269-3274

www.replant.hu