

## **GranuGEL**

### Hidrokolloid Gél

ConvaTec

Egyszeri használatra  
Gőzzel sterilizálva  
25°C-ig tárolható. Óvjuk a fagytól.  
Gyártási szám  
Lejáratási idő

### **LEÍRÁS**

A GranuGEL egy steril gél amely hidrokolloidokból áll (pektin, nátrium-carboximetilcellulóz). A hidrokolloidok egy tiszta, átlátszó, viszkózus hordozóanyagban vannak.

### **JAVALLAT**

A GranuGEL olyan mély sebek kezelésére alkalmas, mint lábszárfekélyek vagy felfekvések. A gél olyan nedves sebkörnyezetet hoz létre, amely segíti a természetes autolitikus debridáló folyamatokat.

### **ELLENJAVALLAT**

Ismert érzékenység a géltre vagy annak alkotórészeire.

### **FIGYELMEZTETÉS**

A sebfertőzés és a seb kolonizációja a GranuGEL használatának nem ellenjavallata. Ha fertőzés gyanúja merül fel, vagy a fertőzés kialakul, a megfelelő antibiotikus kezelést el kell kezdeni. A gél használatát ekkor sem kell abbahagyni, de a folyamatot állandó figyelemmel kell kísérni, és orvosi felügyelet mellett kell a kezelést végezni. Anaerob fertőzés esetén nem célszerű okkluzív terápiát alkalmazni.

A gél használata nem kipróbált harmadfokú égésekre.

Diabéteszes eredetű fekélyek esetén a vércukorszint beállítása és az esetleges magasvérnyomás kontrollja szükséges.

A GranuGEL nedves sebkörnyezetet hoz létre, mely elősegíti a nekrotikus szövetek debridálását és eltávolítását. Ennek következtében az első kötéscserék után a seb megnagyobbodására lehet számítani.

A termék használat előtt steril. Ha a tubus sérült mellőzze használatát.

### **FELHELYEZÉS ÉS ELTÁVOLÍTÁS**

A sebet gondosan tisztítsa meg vízzel, steril sóoldattal vagy a klinikai gyakorlatnak megfelelően. A környező bőrt alaposan szárítsa meg.

A tubus kupakját csavarja le, majd a fehér biztonsági gyűrűt távolítsa el.

A kupak segítségével lyukassza ki a tubus száját.

A gél közvetlenül a sebre nyomja, de a gél szintje nem haladhatja meg a seb szélének szintjét. Az optimális sebkörnyezet kialakításához célszerű a kötést párvisszatartó kötszerrel, például Granuflex® kötszerrel lefedni.

A GranuGEL-t akkor kell eltávolítani, ha a fedőkötés szivárog, vagy a klinikai gyakorlat ezt indokolja. A gél steril sóoldattal mossa le. Váladékozó, nekrotikus sebek esetén három napnál tovább ne hagyja a gél a seben, más tiszta granulálódó sebek esetén akár hét napig is a seben maradhat.

### **TÁROLÁS**

25°C-ig tárolható. Óvjuk a fagytól.

Forgalmazza: Replant 4 Care Kft.  
1119 Budapest,  
Nándorfejérvári út 35.  
replant.hu