

Javallat

A Granuflex® EXTRA THIN (Extra Vékony) az enyhén váladékozó sebek kezelésére alkalmas.

- Akut sebekre: kisebb égési sérülésekre, horzsolásra, felszakadt sebre és műtét utáni sebekre.
- Bőrgyógyászati problémákra: magában vagy szteroidokkal kombinálva psoriasisra vagy egyéb sebek kezelésére, ahol okklúzió javasolt.
- Krónikus sebekre: 1-es és 2-es stádiumú nyomási fekélyekre, enyhén váladékozó lábszárfekélyre.

Hatásmechanizmus

Az adhezív hidrokolloid mátrix és a páraáteresztő külső filmréteg együttesen okkluzív, nedves sebkörnyezetet teremt.

A Granuflex® EXTRA THIN (Extra Vékony) nedves sebkörnyezetet hoz létre, amely az autolitikus debridáció elősegítésével támogatja a gyógyulási folyamatot, az epitelizálódó sejtek migrációját segíti, és lehetővé teszi a kötszer atraumatikus eltávolítását az újonnan képződött szövetek károsítása nélkül.

Alkalmazás

A tiszta és száraz felületű sebre egy, a seb szélén 2 cm-rel túl érő kötszert válasszon ki. A szilikon védőpapír eltávolítása után finoman simítsa és nyomja a kötszert a sebre. A Granuflex® EXTRA THIN (Extra Vékony) elsődleges vagy másodlagos kötszerként is használható, egyéb megfelelő kötszerekkel kombinálva, mint például az AQUACEL® Extra, a GranuGEL® vagy a Kaltostat®. Eltávolításkor finoman a bőrre kell nyomni a kötszert és sarkait óvatosan felemelve 180 fokban visszahajtva lefejtetni a sebről.

Granuflex® EXTRA THIN (Extra Vékony)

Klinikai vizsgálatok által igazolt, hogy a hidrokolloid:

- *nedves sebkörnyezetet biztosít,*
- *támogatja az autolitikus debridációt,⁴*
- *serkenti a granulációs szövetképződést,⁴*
- *optimális sebgyógyulási feltételt biztosít.¹*

Vékony poliuretán film védőréteg:

- *baktérium²- és vírusgátat³ képez,*
- *csökkenti a fertőzés kockázatát,²*
- *vízálló.*

Könnyű használat:

- *könnyen helyezhető és eltávolítható,*
- *biztonságosan fennmarad a kötszer még a nehezen kötőzhető helyeken is,*
- *megelőzi a kötszer felgyűrődését.*

Hidrokolloid

A hidrokolloid technológia hosszú ideje benchmarknak számít a nedves sebkezelésben. A ConvaTec egyedülálló formulát kínál, melynek méhkaptár struktúrájú mátrixa nátrium-karboximetil-cellulóz, zselatin, pektin és adhezív polimerek keverékéből áll. Sebváladékkal való érintkezésekor a hidrokolloid mátrix egybefüggő gélle alakul, mely a nedves sebgyógyulásnak kedvez.

Granuflex® EXTRA THIN

A Granuflex® EXTRA THIN (Extra Vékony) optimális nedves sebkörnyezetet teremt, mely elősegíti a gyengén váladékozó sebek gyors gyógyulását⁵. Külső filmrétege tartós, vízálló és elzárja a baktériumokat, ezáltal plusz védelmet nyújt. A Granuflex® EXTRA THIN (Extra Vékony) tetszőlegesen alakítható és a kívánt alakúra vágható a nehezen kötőzhető területek könnyű kezelésére.



A Granuflex® EXTRA THIN (Extra Vékony) többféle méretben beszerezhető, mind otthoni, mind kórházi használatra a különböző sebtípusokra:

Méret	Kötszer / doboz	Termékkód
5 cm x 10 cm	10	187959CW
10 cm x 10 cm	5	187954CW
15 cm x 15 cm	5	187956CW

Referenciák:

1. Burgess B., An investigation of Hydrocolloids. Professional Nurse 1993; 8 (7) Supplement
2. Hutchinson J.J., McGuckin M., Occlusive dressings: A microbiologic and clinical review. Am J Infect Control, 1990; 18 (4): 257-268
3. Bowler P.G., Delargy H., Prince d., Fondberg L., The viral barrier properties of some occlusive dressings and their role in infection control. Wounds, 1993; 5 (1): 1-8
4. Romanelli M. Objective measurement of venous ulcer debridement and granulation with a skin colour reflectance analyser. Wounds, 1997 (4): 122-126
5. Meredith G.D., Dressed to Heal. Journal of District Nursing, September 1988