

CE
0086

STERILE

Bordered Granuflex®

Szegéllyel ellátott Granuflex

Hidrokolloid kötszer



III ConvaTec

STERILE Sugársterilizált

Figyelem! - Lásd a használati utasítást.

Lot szám

Lejárat idő

A TERMÉK LEÍRÁSA


A szegéllyel ellátott Granuflex olyan steril, hidrokolloid kötszer, amely egy polimer anyagba ágyazott belső (a sebfelszínnel érintkező) hidrokolloid rétegből és egy külső poliuretán filmrétegből áll. A kötszer kölcsönhatásba lép a sebváladékkal és olyan nedves környezetet hoz létre, amely kedvező a seb gyógyulása szempontjából, magába szívja a váladékot és segíti az autolitikus sebtisztulást. A kötszer tartalmaz egy tapadószeget, ezért kiegészítő ragtapasz használata nem szükséges. A szegéllyel ellátott Granuflex használható elsődleges vagy másodlagos kötszerként, egyéb kötszerekkel kombinálva is.

JAVALLATOK: Krónikus sebek - a bőr fekélyei (beleértve a teljes mélységű sebeket), a felfekvést (I-IV. stádium) és a lábszárfekélyt. Akut sebek - Felszínes sérülések (pl. kisebb horzsolások), másodfokú égési sebek, bőrátültetési donorhelyek.

ELLENJAVALLAT: A kötszer vagy összetevői iránti érzékenység esetén nem ajánlott.




ELŐVIGYÁZATOSSÁG ÉS MEGFIGYELÉS: 1) Amennyiben indokolt, megfelelő kiegészítő kezelést kell alkalmazni, (pl. fokozatos kompressziós kötést kell felhelyezni a vénás lábszárfekély esetén, illetve nyomáscsökkentő intézkedéseket kell tenni felfekvés kezelésénél). 2) A kötszer által teremtett autolitikus sebtisztulást biztosító környezet eredményezheti azt, hogy a seb az első néhány kötszercserére alkalmával nagyobbak tűnik, mint korábban. 3) A krónikus sebek kolonizációja általános dolog, nem jelent kontraindikációt a kötszer használatával szemben. A kötszer fertőzött sebek esetén is használható orvosi felügyelet és a megfelelő antibiotikum kezelés mellett, de ilyenkor gyakrabban kell ellenőrizni a sebet. 4) Ritkán felléphet bőr irritáció és/vagy a bőr macerációja, de jelentettek hipergranulációt és allergiás reakciót is. 5) Nem javasoljuk a kötszer gyakori cseréjét az olyan sebeknél, melyeknél a sebet környező bőr veszélyeztetve van. 6) Klinikai anaerob fertőzés esetén a seb lezárásával járó terápia nem javasolt.

RAKTÁROZÁSI TUDNIVALÓK

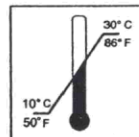

Szobahőmérsékleten kell tartani. Ne tegye hűtőszekrénybe és védje a nedvességtől.

Ez a termék szállításakor steril. Ha a termék közvetlen csomagolása megsérül, ne használja fel.

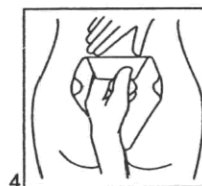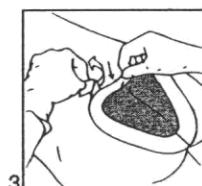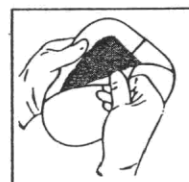

ALKALMAZZA A KÖTSZERT ÚGY, HOGY 2 CM-REL TÚLNÝÚLJON A SEB SZÉLÉN, A SZEGÉLYT NEM BELESZÁMÍTVÁ

Megjegyzés: Miközben a kötszer felszívja a sebváladékot, a gél kialakulása, buborékként, láthatóvá válik a kötszer külső felszínén.

1. A védő papírrétegnek csak a felső részét vegye le. MEGJEGYZÉS: A háromszög alakú kötszert többféle irányban is lehet használni a fekélyes seb helyzetétől függően. Keresztcsonttáji fekélyeknél a kötszer hosszában félbe lehet hajtani, hogy könnyebben lehessen alkalmazni a keresztcsonttáji hajlatokban.
2. Helyezze rá a kötszert a sebre. Simítsa a helyére, különösen a középső tapadó rész széleinél.
3. Hajtsa fel a szegélyt és vegye le a tapadós részről a védőfóliát; nyomással rögzítse a szegélyeket a helyére.
4. Eltávolításakor egyik kezével szorítsa a bőrre a kötszert, a másikkal pedig óvatosan emelje el a kötszer egyik szélét.

A kötszert hét napnál tovább nem ajánlatos a seben hagyni.

ORKI 593/97

ConvaTec Limited,
Deeside, UK

MAGYARORSZÁG:

Forgalmazza:

Replant 4 Care Kft.
1119 Budapest,
Nándorfejérvári út 35.
www.replant.hu