

Javallat

A Granuflex® Bordered (Szegélyezett) az enyhén váladékozótól a mérsékelt váladékozó sebek kezelésére alkalmas.

- Krónikus sebekre: nyomási fekélyekre, lábszárfekélyre.
- Akut sebekre: kisebb égési sérülésekre, donor területekre, egyéb műtéti és traumás sebekre.

Hatásmechanizmus

Az adhezív hidrokolloid mátrix szerkezet és a páraáteresztő külső filmréteg együttesen okkluzív, nedves sebkörnyezetet teremt. A Granuflex® Bordered (Szegélyezett) nedves sebkörnyezetet hoz létre, amely az autolitikus debridáció elősegítésével támogatja a gyógyulási folyamatot, segíti az epitel sejtek migrációját, és lehetővé teszi a kötszer fájdalommentes eltávolítását anélkül, hogy az újonnan képződött szöveteket károsítaná.

Alkalmazás

A tiszta és száraz felületű sebre egy, a seb szélén 1-2 cm-rel túl érő kötszert válasszon ki (a kötszer szegélyét bele nem számítva). A szilikon védőpapír eltávolítása után finoman simítsa és nyomja a kötszert a sebre. Hajtassa vissza a szegélyeket, távolítsa el a szegély hátsó tapadófelületén található papírt és finoman simítsa a szegélyeket a helyükre. A Granuflex® Bordered (Szegélyezett) másodlagos kötszerként használható egyéb, megfelelő kötszerekkel kombinálva, mint például az AQUACEL® Extra, a GranuGEL® vagy a Kaltostat®. Eltávolításkor a bőrre kell nyomni a kötszert és sarkait óvatosan felemelve 180 fokban visszahajtva lefejtetni a sebről. Használat előtt, kérjük olvassa el a csomagolásban található használati útmutatót.

Granuflex® Bordered

Adhezív szegély:

- *biztonságosan fennmarad a kötszer még a nehezen kötözhető helyeken is,*
- *megelőzi a kötszer felgyűrődését.*

Nedves sebkörnyezetet biztosít:

- *támogatja az autolitikus debridációt.⁴*

Klinikai vizsgálatok által igazolt, hogy a hidrokolloid:

- *optimális sebgyógyulási feltételt biztosít,¹*
- *serkenti a granulációs szövetképződést.⁴*

Vékony poliuretán filmréteg:

- *baktérium²- és vírusgátat³ képez,*
- *csökkenti a fertőzés kockázatát,²*
- *vízálló.*

Kevesebb kötszercsere, mint géz használatával:

- *minimálisra csökkenti a gondozási költséget.⁶*

Enyhíti a fájdalmat:

- *maximalizálja a beteg összkomfortérzetét,⁵*
- *könnyen felhelyezhető és eltávolítható.*

Hidrokolloid

A hidrokolloid technológia hosszú ideje benchmarknak számít a nedves sebkezelésben. A ConvaTec egy olyan egyedülálló hidrokolloid formulát kínál, melynek méhkaptár struktúrájú mátrixa nátrium-karboximetil-cellulóz, zselatin, pektin és adhezív polimerek keverékéből áll. Sebvalódekkal való érintkezésekor a hidrokolloid mátrix egybefüggő gélle alakul, mely a nedves sebgyógyulásnak kedvez.

GRANUFLEX® BORDERED

A Granuflex® Bordered (Szegélyezett) optimális nedves sebkörnyezetet teremt, mely a gyengén váladékozótól a mérsékelt váladékozó sebek gyógyulását segíti elő. Az egyedülálló Granuflex® Bordered (Szegélyezett) hidrokolloid összetétel elősegíti az autolitikus debridációt és serkenti a granulációs szövetképződést. A Granuflex® Bordered (Szegélyezett) szélei elválnak, hogy könnyű legyen a használata, és kevésbé gyűrődjen meg a nehezen kötözhető helyeken is.



A Granuflex® Bordered (Szegélyezett) többféle méretben beszerezhető, mind otthoni, mind kórházi használatra a különböző sebtípusokra:

Kötszer	Adhezív szegély	Kötszer / doboz	Termékkód
6 cm x 6 cm	2 cm	5	187970CW
10 cm x 10 cm	2 cm	5	187971CW
15 cm x 15 cm	2,5 cm	5	187972CW
10 cm x 13 cm	2,5 cm	5	187973CW
15 cm x 18 cm	2,5 cm	5	187974CW

Referenciák:

- Burgess B., An investigation of Hydrocolloids. Professional Nurse 1993; 8 (7) Supplement
- Hutchinson J.J., McGuckin M., Occlusive dressings: a microbiologic and clinical review. Am J Infect Control, 1990; 18 (4): 257-268
- Bowler P.G., Delargy H., Prince D., Fondberg L., The viral barrier properties of some occlusive dressings and their role in infection control. Wounds, 1993;5 (1); 1-8.
- Romanelli M. Objective measurement of venous ulcer debridement and granulation with a skin colour reflectance analyser. Wounds, 1997 (4): 122-126
- Nemeth A. et al. Faster healing and less pain in skin biopsy sites treated with an occlusive dressing. Arch Dermatol. 1991; 127: 1679-1683
- Lindholm C. Leg ulcer treatment in hospital and primary care in Sweden: cost effective care and quality of life. Proceedings of the international committee on Wound Management meeting, Advances in Wound Care. 8(5): 45-47.