

CE
0086

STERILE

Granuflex®

Hidrokolloid kötszer



III ConvaTec

Egyszeri használatra

STERILE Sugársterilizált

Figyelem! - Lásd a használati utasítást.

Lot szám

Lejárat idő

A TERMÉK LEÍRÁSA

A Granuflex hidrokolloid kötszer olyan steril hidrokolloid kötszer, amely egy polimer anyagba ágyazott belső (a sebfelszínnel érintkező) hidrokolloid rétegből és egy külső poliuretán hab rétegből áll. A kötszer kölcsönhatásba lép a sebváladékkal és olyan nedves környezetet hoz létre, amely kedvező a seb gyógyulása szempontjából, magába szívja a váladékot és segíti az autolitikus sebtisztulást. A Granuflex hidrokolloid kötszer használható elsődleges vagy másodlagos kötszerként, egyéb kötszerekkel kombinálva is.


JAVALLATOK: Krónikus sebek - Felfekvés (I-IV. stádium), lábszárfekély. **Akut sebek** - Sebészeti beavatkozások utáni sebek (pl. műtét utáni sebek, bőrátültetési donorhelyek), baleseti sérülések (kisebb horzsolások, szakított sebek), égési sebek (első- és másodfokú égések), bőrgyógyászati kimerülések.

ELLENJAVALLAT: A kötszer vagy összetevői iránti érzékenység esetén nem ajánlott.

ELŐVIGYÁZATOSSÁG ÉS MEGFIGYELÉS: 1.) Amennyiben indokolt, megfelelő kiegészítő kezelést kell alkalmazni, (pl. fokozatos kompressziós kötést kell felhelyezni a vénás lábszárfekély esetén, illetve nyomáscsökkentő intézkedéseket kell tenni felfekvés kezelésénél). 2.) A kötszer által teremtett autolitikus sebtisztulást biztosító környezet eredményezheti azt, hogy a seb az első néhány kötszercsere alkalmával nagyobbak tűnik, mint korábban. 3.) A krónikus sebek kolonizációja általános dolog, nem jelent kontraindikációt a kötszer használatával szemben.




A kötszer fertőzött sebek esetén is használható orvosi felügyelet és a megfelelő antibiotikumok kezelése mellett, de ilyenkor gyakrabban kell ellenőrizni a sebet. 4.) Ritkán felléphet bőr irritáció és/vagy a bőr macerációja, de jelentettek hipergranulációt és allergiás reakciót is. 5.) Nem javasoljuk a kötszer gyakori cseréjét az olyan sebeknél, amelyeknél a sebet környező bőr veszélyeztetve van. 6.) Klinikai anaerob fertőzés esetén a seb lezárásával járó terápia nem javasolt.

RAKTÁROZÁSI TUDNIVALÓK

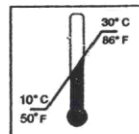

Szobahőmérsékleten kell tartani. Ne tegye hűtőszekrénybe és védje a nedvességtől.

Ez a termék szállításakor steril. Ha a termék közvetlen csomagolása megsérül, ne használja fel.

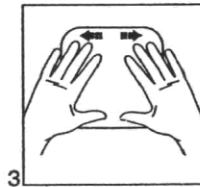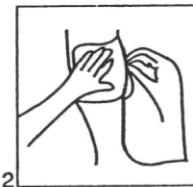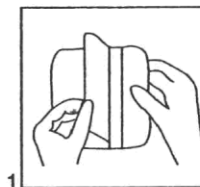

ALKALMAZZA A KÖTSZERT ÚGY, HOGY 2 CM-REL TÚLNYÚLJON A SEB SZÉLÉN

Megjegyzés: Miközben a kötszer felszívja a sebváladékot, a gél kialakulása, buborékként, láthatóvá válik a kötszer külső felszínén.

1. Vegye le a szilikon védőfóliát a kötszer hátuljáról, és igyekezzen minél kisebb helyen érinteni ujjával a tapadófelületet.
2. Óvatosan helyezze a kötszert a sebre; ne nyújtsa meg.
3. Rögzítse a kötszert a helyére, hogy biztonságosan tapadjon a seb szélei köré.
4. Ha szükséges, rögzítse a kötszer széleit nem allergizáló ragtapasszal.
5. Eltávolításakor egyik kezével szorítsa a bőrt a kötszert, a másikkal pedig óvatosan emelje el a kötszer egyik szélét.

A kötszert hét napnál tovább nem ajánlatos a seben hagyni.

ORKI 593/97

ConvaTec Limited,
Deeside, UK

MAGYARORSZÁG:

Forgalmazza:

Replant 4 Care Kft.
1119 Budapest,
Nándorfejérvári út 35.
www.replant.hu