

Javallat

A Granuflex® az enyhén váladékoztól a mérsékelt váladékoztó sebek kezelésére alkalmas.

- Akut sebekre: égési sérülésekre, donor területekre, egyéb műtéti és traumás sebekre.
- Krónikus sebekre: nyomási fekélyekre, lábszárfekélyre.

Hatásmechanizmus

Az adhezív hidrokolloid mátrix szerkezet és a páraáteresztő külső filmréteg együttesen okkluzív, nedves sebkörnyezetet teremt.

A Granuflex® nedves sebkörnyezetet hoz létre, amely az autolitikus debridáció elősegítésével támogatja a gyógyulási folyamatot, segíti az epiteliálódó sejtek migrációját, és lehetővé teszi a kötszer atraumatikus eltávolítását az újonnan képződött szövetek károsítása nélkül.

Alkalmazás

A tiszta és száraz felületű sebre egy, a seb szélén legalább 3 cm-rel túlért kötszert válasszon ki. A szilikon hátlap eltávolítása után finoman simítsa és nyomja a kötszert a sebre a biztonságos tapadás érdekében. A Granuflex® másodlagos kötszerként használható egyéb, megfelelő kötszerekkel kombinálva, mint például az AQUACEL® Extra, a GranuGEL® vagy a Kaltostat®.

Eltávolításkor a bőrre kell nyomni a kötszert és finoman lehúzával elemelni a sebtől.

Granuflex®

Költséghatékony:

- *olcsóbb, mint a hagyományos kezelési módszerek, mint pl. a géz.*⁷

Klinikai vizsgálatok által igazolt, hogy a hidrokolloid:

- *nedves sebkörnyezetet biztosít,*¹
- *támogatja az autolitikus debridációt,*⁴
- *serkenti a granulációs szövet képződését,*⁴
- *optimális sebgyógyulási feltételt biztosít,*¹

Vékony poliuretán filmréteg:

- *baktérium²- és vírusgátat³ képez,*
- *csökkenti a fertőzés kockázatát,*²
- *vízálló.*

Kevesebb kötszercsere, mint géz használatával:

- *minimálisra csökken az ápolási költség.*^{6,7}

Enyhíti a fájdalmas sebeket:

- *maximalizálja a beteg kényelemérzetét.*⁵

Könnyű használat:

- *könnyen felhelyezhető és eltávolítható.*

Hidrokolloid

A hidrokolloid technológia hosszú ideje benchmarknak számít a nedves sebkezelésben. A ConvaTec egy olyan egyedülálló hidrokolloid formulát kínál, melynek méhkaptár szerkezete nátrium-karboximetil-cellulóz, zselatin, pektin és adhezív polimerek keverékéből áll. Sebváladékkal való érintkezésekor a hidrokolloid mátrix egybefüggő gélle alakul, mely a nedves sebgyógyulásnak kedvez.

GRANUFLEX®

A Granuflex® optimális nedves sebkörnyezetet teremt, mely a kevésbé váladékoztól a mérsékelt váladékoztó sebek gyógyulását elősegíti. Az egyedülálló Granuflex® hidrokolloid összetétel elősegíti az autolitikus debridációt és a gyógyuláshoz vezető granulációt. A Granuflex® enyhíti a fájdalmat, könnyű az alkalmazása és az eltávolítása, a betegnek ezáltal nő a komfortérzete. A Granuflex® tetszőlegesen alakítható és a kívánt alakúra vágható a nehezen kötőzhető területek könnyű kezelésére. A Granuflex® a váladék mennyiségétől függően 5-7 napig is fenn tartható a seben, az ápolás így költséghatékony.



A Granuflex® többféle méretben beszerezhető, mind otthoni, mind kórházi használatra a különböző sebtípusokra:

Méret	Kötszer / doboz	Termékkód
10 cm x 10 cm	10	187639CW
15 cm x 15 cm	10	187632CW
20 cm x 20 cm	5	187662CW

Referenciák:

- Burgess B., An investigation of Hydrocolloids. Nurse 1993; 8 (7) Supplement
- Hutchinson J.J., McGuckin M., Occlusive dressings: a microbiologic and clinical review. Am J Infect Control, 1990; 18 (4): 257-268
- Bowler P.G., Delargy H., Prince D., Fondberg L., The viral barrier properties of some occlusive dressings and their role in infection control. Wounds, 1993; 5 (1): 1-8.
- Romanelli M. Objective measurement of venous ulcer debridement and granulation with a skin colour reflectance analyser. Wounds, 1997 (4): 122-126
- Nemeth A. et al. Faster healing and less pain in skin biopsy sites treated with an occlusive dressing. Arch Dermatol. 1991; 127: 1679-1683
- Lindholm C. Leg ulcer treatment in hospital and primary care in Sweden: cost effective care and quality of life. Proceedings of the international committee on Wound Management meeting, Advances in Wound Care. 8(5): 45-47.
- Harding K., Cutting K. and Price P. The cost effectiveness of Wound management protocols of care. BJN October 2000.