

CE
0086

STERILE R

KALTOSTAT®

Kavitális sebkötszer



ConvaTec

Egyszeri használatra

STERILE R Gamma sterilizált



Fénytől védve, száraz, hűvös helyen tárolandó



Figyelem - Olvassa el a használati utasítást



Lot szám



Lejárat idő

LEÍRÁS

A Kaltostat kavitális sebkötszer puha, fehér, a sebváladékok elszíneződő, kalcium-nátrium-alginát rostszálakat tartalmazó, steril kötszer, amelynek "kötélszerű" alakja van. Az alginát rostszálak abszorbeálják a sebváladékot vagy a sóoldatot, miáltal a kötszer tömör gél/rostszál anyaggá alakul. A gél nedves és meleg környezetet biztosít a seb felszínén. A gél segítségével a kötszert az új szövet károsítása nélkül, vagy egészen enyhe károsításával el lehet távolítani. A kötést - a sebtől függően - akár hét napig is rajta lehet hagyni a seben.

JAVALLAT

A KALTOSTAT külső használatra szánt kötszer, amely felszívja a sebváladékot és megvédi a sebet a fertőzéssel szemben

A KALTOSTAT kavitális sebkötszer olyan közepesen vagy erősen váladékozó üreges sebek helyi ellátására használatos, mint a decubitus-fekély, vénás és artériás eredetű fekélyek, diabéteszes fekélyek, bőrátültetések, horzsolások, felszakított sebek, felületes égések, sebészeti beavatkozás utáni bemetszések, és más olyan külső sérülések, amelyeket valamely trauma okozott.

ELLENJAVALLAT

A kötszer használata nem ajánlott száraz, enyhén váladékozó sebek, harmadfokú égési sebek esetén, és nem javasoljuk sebészeti szivacsokként történő használatát sem.

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK

1) Minden sebben lehetnek mikroorganizmusok. Ha valódi klinikai fertőzés alakulna ki (láz, nyomásérzékenység vagy kivörösödés tapasztalható a seb környékén), meg kell tenni azokat a megfelelő lépéseket, amelyeket a kezelőorvos előír az ilyen fertőzések esetén. Fertőzés esetében a rendszeres ellenőrzésnek és a seb tisztításának mindennapos gyakorlatnak kell lennie. A KALTOSTAT kavitális sebkötszer ilyen esetben is használható, de biztosítani kell, hogy a kötszert rendszeresen cseréljék (legalább naponta, amíg a fertőzés jelen van). 2) Bizonyos sebek, mint a lábszárfekély és a felfekvés, csak akkor gyógyulnak, ha lépéseket tesznek arra, hogy a sebeket okozó betegséget is meggyógyítsák. A KALTOSTAT kavitális sebkötszer helyi sebellátásra szolgál és az általános kezelési program része lehet ilyen típusú sebek esetében. 3) A KALTOSTAT kavitális sebkötszer arra szolgál, hogy a seb gyógyulását elősegítő nedves környezetet megteremtse. Ha a KALTOSTAT kavitális sebkötszer kezdetben gél állapotú volt, amely azonban idővel kiszáradt, a sebről való eltávolítása nehézségekbe ütközhet. Ha a gél kiszáradt, a kötszert sóoldattal meg kell nedvesíteni, hogy újra hidratált állapotba kerüljön.

A KALTOSTAT KAVITÁLIS SEBKÖTSZER ALKALMAZÁSA

1. Mielőtt a KALTOSTAT kavitális sebkötszert alkalmaznánk, a sebet meg kell tisztítani az elhalt szövetektől és pórkától, majd alkalmas, nem toxikus seblemosó folyadékkal le kell mosni, például steril sóoldattal.
2. A KALTOSTAT kavitális sebkötszer pontosan akkorára kell vágni amekkora a seb mérete, majd szárazon rá kell helyezni a sebre. A KALTOSTAT kavitális sebkötszer rögzítéséhez megfelelő másodlagos kötszer használata szükséges.
3. a. A KALTOSTAT kavitális sebkötszert akkor kell cserélni, ha a sebváladék átüt a másodlagos kötéseken vagy ha a klinikai gyakorlat szerint indokolt.
b. Az eltávolítást steril sóoldattal való esetleges megnedvesítéssel kell segíteni.
c. A seb környékét szükség esetén meg kell tisztítani, mielőtt az új kötőzöszert felhelyeznénk.
d. Mint minden más kötszert, a KALTOSTAT kavitális sebkötszert is megfelelő időközönként el kell távolítani a sebről, és a sebet meg kell tisztítani.

TÁROLÁS

Fénytől védve, száraz, hűvös helyen tárolandó.

A termék steril amíg a csomagolás érintetlen. Amennyiben a közvetlen csomagolás sérült, ne használja.

ConvaTec Limited,
Deeside, UK

ORKI 905/95

Forgalmazza:

Replant 4 Care Kft.
1119 Budapest,
Nándorfejevári út 35.
www.replant.hu