

1/2


GentleCath™
that's a relief

Glide



ConvaTec

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót az eszköz használata előtt.

Hidrofil intermittáló vizelet katéter

Javallatok

- Az intermittáló katétereket a húgyhólyag rutin lecsapolására tervezték. A katétert a húgycsövön keresztül kell behelyezni.

Ellenjavallatok

- A katéter használatának szükségességéről, illetve annak ellenjavallatáról minden esetben egészségügyi szakembernek kell döntenie.
- Ne használja együttesen irrigáláskor vagy becsepegtetéskor.

Figyelmeztetések, óvintézkedések és megjegyzések

- Behelyezés előtt ellenőrizze a katéter épségét és hogy a csomagoláson megjelölt méretű-e.
- Válasszon másik katétert, ha szükséges.
- Ne használja, ha a csomagolást felbontották vagy sérült.
- Ne érjen a katéter csúcsához, és csak a védőfólián keresztül érjen a katéter többi részéhez is.
- A jelölt helyen nyomja össze a vizes tasakot, hogy a víz a csomagoláson belülről folyjon ki, terítse be a katétert a vízzel és 2 percen belül helyezze be.
- A katétert mindig lassan és óvatosan helyezze be és távolítsa el. Sose erőltesse a katétert.
- A katéter kivételét hagyja abba, ha még folyik vizelet. Akkor folytassa, ha nincs már vizeletfolyás.
- A csomagolás hátulján található kék, ragadós pötty arra szolgál, hogy a csomagolást felhelyezze valamilyen felületre használat során.
- Ha nem folyik a vizelet vagy egyéb komplikáció lép fel (pl. fájdalom, nehézkes behelyezés vagy eltávolítás, vérzés, arra utaló jel, hogy a húgyútban fertőzés vagy váladékozás lépett fel), kérje ki egészségügyi szakember tanácsát.
- Ha rosszul lett behelyezve a katéter, el kell távolítani, többször nem használható fel. Új katéter behelyezése szükséges.
- A használt katétert mindig dobja el.



Sterilized Using
Ethylene-Oxide



Sterilized Using
Irradiation



Use By
Date



Do Not
Reuse



Do Not
Resterilize



Keep
Dry



Prescription
Only Product



Consult
Instructions
for Use



Caution

Etilén-oxiddal sterilizálva

Sugárzással sterilizálva

Lejáratási idő

CE0086

Egyszerhasználatos

Nem újrasztelizálható

Száraz helyen tárolandó

Vényköteles termék

Olvassa el a használati utasítást

Figyelmeztetés

Ne használja, ha a csomagolás sérült.

Gyártja: ConvaTec Ltd.

First Avenue,
Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire,
CH5 2NU, UK
www.convatec.com

Gyártva a ConvaTec Inc. – Greensboro, NC 27409 USA, 1-800-422-8811, www.convatec.com részére.

Szlovákiában készült .

A GentleCath az UnoMedical a/s. márkája
©2017 ConvaTec Inc. 1719466

Forgalmazza: Replant 4 Care Kft.

1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35., Tel.: 06-1/374-90-80, www.replant.hu